

Tendinitis oder chronische Sehnenerkrankung?

Tendinitis bezeichnet die Entzündung einer Sehne – also der dicken, faserigen Stränge, die den Muskel am Knochen befestigen. Sie verursacht Gelenkschmerzen, vor allem bei körperlicher Anstrengung oder sich wiederholenden Bewegungen. Manchmal kann die Sehne auch schwach, rot und geschwollen sein und sich warm anfühlen. Wenn diese Symptome länger als 3 Monate andauern, haben Sie möglicherweise eine chronische Sehnenerkrankung.

		Beschreibung	Verlauf der Behandlung	Erholungszeit
Behandlung von Tendinitis	R.I.C.E.	Ruhe, Eis, Kompression und Hochlagerung.	Möglicherweise sind wiederholte Behandlungen erforderlich.	Bis zu einem Jahr oder länger.
	Medikation	Entzündungshemmende oder kortisonhaltige Injektionen.	Möglicherweise sind wiederholte Behandlungen erforderlich.	Variiert
	Physiotherapie (PT)	Dehnungs- und Kräftigungsübungen.	Erfordert mehrere Termine. In der Regel in Kombination mit Ruhe, Medikamenten oder einem chirurgischen Eingriff.	Variiert
Behandlung chronischer Sehnenerkrankungen	Offen chirurgischer Eingriff	Über eine große Inzision wird beschädigtes Gewebe mit einem Skalpell herausgeschnitten und entfernt.	Operation unter Vollnarkose; die Dauer hängt vom Ausmaß der Schädigung ab. Oft ist danach Physiotherapie notwendig.	6 Monate oder länger (eingeschränkte Aktivität).
	TENEX HEALTH TX®	Über eine nur 3-5 mm lange Inzision wird beschädigtes Gewebe mit Ultraschallenergie präzise herausgeschnitten und entfernt.	Schnelles Verfahren (in wenigen Minuten); in der Regel mit örtlicher Betäubung und ohne Nähte oder zusätzliche Behandlungen.	6-8 Wochen oder weniger ² (Ergebnisse können variieren)

Die Behandlungsmöglichkeiten bei Sehnenschmerzen unterscheiden sich hinsichtlich Wirksamkeit und Erholungszeit.

Fragen Sie Ihren Arzt, wie Tenex Health TX® Ihnen helfen kann, chronische Schmerzen loszuwerden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Bioventus Customer Care Team.

Großbritannien / Irland

cc@bioventusglobal.com

UK gebührenfreie Rufnummer: 0800 05 16 384

Fax: 0207 147 1430

IR gebührenfreie Rufnummer: 00800 02 04 06 08 und 00800 03 05 07 09

Fax: 0165 39103

Deutschland

cc@bioventusglobal.com

Gebührenfreie Rufnummer: 0800 - 183 37 35

Fax: 032 - 22 10 94 056

Rest der Welt


cc@bioventusglobal.com

Tel.: +31 (0)235548805



TENEX HEALTH Tenex Health ist jetzt ein Teil von Trice Medical

Vertrieb durch:

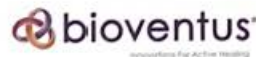

Literatur: 1. Daten liegen vor. Die Ergebnisse sind individuell verschieden. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die Anwendung im Weichgewebe. TXB hat größeres Potenzial als TX1 oder TX2 aufgrund der schnelleren und umfassenderen Gewebeentfernung. Die Leistung in Knochen wurde nicht untersucht. 2. Stulman CR, et al. Orthopedics 2016;39(6):e1028-e1035; Yanish GJ, et al. Eingereicht, J Shoulder Elbow Surg. 2019 Apr.

Tenex Health, Inc. ist der Hersteller des Tenex Health TX® Systems.

Bioventus LLC ist ein autorisierter internationaler Händler für TRICE medical. Bioventus und das Bioventus Logo sind eingetragene Warenzeichen von Bioventus LLC. Tenex Health, Tenex Health TX® und das Tenex Health Logo sind Marken von Tenex Health, Inc.


Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch Ihren Arzt gedacht.

SMK-004970 04/23

Schluss mit chronischen Sehnen- und Knochenspornschermerzen

tenex•health tx®

Vertrieb durch:

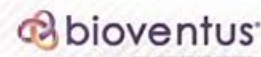

Höchste Zeit für die Heilung

Ruhe, Eis, rezeptfreie Schmerzmittel, sogar Spritzen - Sie haben schon alles versucht. Aber der Sehnenschmerz, der durch Überlastung, Verletzungen, Verkalkung oder einen Knochenvorsprung verursacht wird, ist immer noch da und quält Sie Tag ein Tag aus. Eine Operation möchten Sie vermeiden. Was ist also der nächste Schritt?

Eine sichere und wirksame Alternative bei Schmerzen in Weichgewebe

Das Tenex Health TX® System bietet eine revolutionäre einzeitige Behandlung für chronische Sehnenschmerzen, die unter örtlicher Betäubung durchgeführt wird und nur wenige Minuten dauert. Für die meisten Patienten bedeutet dies weniger Beschwerden und eine bis zu viermal schnellere Wiederaufnahme ihrer Aktivitäten als bei einer offenen Operation.^{1,2}

Was Sie bei Ihrem Eingriff erwartet

Tag des Eingriffs

Das einfache Verfahren wird ambulant durchgeführt. Ihr Arzt nimmt eine örtliche Betäubung vor, sodass Sie in der Regel bei Bewusstsein sind. Zunächst wird mit diagnostischer Bildgebung (z. B. Ultraschall, Fluoroskopie oder C-Bogen) die genaue Ursache Ihrer Schmerzen ermittelt. Ihr Arzt nimmt dann einen kleinen Einschnitt vor und führt die TX MicroTip ein. Durch den Einsatz moderner Ultraschallenergie wird geschädigtes Weichgewebe präzise herausgeschnitten und entfernt, während gesunde Sehnen erhalten bleiben.

Nach dem Eingriff

Ihr Arzt legt einen sterilen Mullverband an. Nähte sind nicht erforderlich.

Erholung nach der Operation

Abhängig vom behandelten Bereich wird Ihr Arzt Ihnen empfehlen, sich am ersten Tag noch zu schonen und erst nach ein paar Tagen leichte Aktivitäten und Dehnübungen wieder aufzunehmen. Die Patientenanweisungen sind individuell unterschiedlich.

Minimalinvasive Behandlung für chronische Erkrankungen von schmerzenden Sehnen, Verkalkungen oder Knochen.

Schulter/
Rotatorenmanschette

Trizeps

Ellenbogen
(Tennis-/Golferarm)

Hüfte/
Gesäßmuskulatur

Hintere
Oberschenkelmuskulatur

Knie

Knochensporne/
Haglund-Deformität

Knöchel
(Achillessehne/
Peronealsehne)

Fuß
(Plantarfasziitis)

„Dank Tenex Health habe ich es geschafft, wieder aufs Rad zu steigen und mit einem Grand-Tour-Sieg in die Geschichtsbücher einzugehen - und das mit 41 Jahren.“

-Chris Horner,
US-amerikanischer
Profi-Radfahrer, Patient

MEHR ALS
150.000
VERFAHREN

Tenex Health TX®
wurde bereits in
> 150.000 Verfahren
eingesetzt

Ist Tenex Health TX® für Sie geeignet?

- Haben Sie Schmerzen in Schulter, Ellenbogen, Hüfte, Knie, Knöchel oder Fuß?
- Dauert der Schmerz bereits 3 Monate oder länger an?
- Haben Sie es bereits mit Ruhe, Eis und/oder rezeptfreien Schmerzmitteln versucht?
- Möchten Sie eine offene Operation vermeiden?

Klinische Ergebnisse in Weichgewebe



Klinisch wirksam bei der Behandlung chronischer Sehnenerkrankungen bei ≥ 85 % der Patienten¹

Dauerhafte Heilung der Sehne in nur einem Eingriff

Nach nur einem einzigen Eingriff mit dem Tenex Health TX® System können Sie sich schneller wieder Ihren Lieblingsaktivitäten zuwenden - ganz ohne Physiotherapie oder Opiode. Weil die Behandlung nachweislich eine anhaltende Heilung des Weichgewebes bewirkt, können Sie zuversichtlich sein, dass Sie schmerzfrei bleiben.¹

Eine sichere, wirksame und schnelle Methode zur Entfernung von Knochenspornen

Das Tenex Health TX® System ist eine minimalinvasive Methode zur Entfernung schmerzhafter Knochensporne am ganzen Körper und zur Behandlung von Erkrankungen wie der Haglund-Deformität und diabetischen Fußulcera. Das Verfahren ist dank dem minimalen Einschnitt viel schneller als eine offene Operation, präzise und sehr effektiv bei der Entfernung von schmerzenden Knochenvorsprüngen.